

## PRECAUCIONES

Las muestras enviadas han resultado negativas en el tamizaje a HIV. HCV, AgsHB, Sífilis, Chagas y Brucella, sin embargo, se debe tener en cuenta que deben ser tratadas como infecciosas (depositar residuos en bolsa roja y contenedor hermético de RPBI), como lo marca la norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-SSA2-2002, Manejo y disposición de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos.

Si las muestras fueron dañadas durante el envío (viales rotos o vacíos), deseche el contenido de acuerdo con el punto anterior; informando a la brevedad la **Departamento de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad** ó al Depto. De Inmunohematología al correo electrónico [cceinmuno.cnts@gmail.com](mailto:cceinmuno.cnts@gmail.com)

para que le sea enviado un nuevo panel de evaluación.

Si el envío lo recibe sin problema, prosiga al

## OBSERVACIÓN:

**Únicamente realizar las pruebas solicitadas en el formato.**

## NO realizar :

- Gpo. ABO Inverso.
- Pruebas de Compatibilidad.

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



## CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA

## INSTRUCTIVO DE MANEJO Y CONTROL

En cumplimiento al artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, donde se establece que le corresponde al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea *actuar como laboratorio nacional de referencia en programas de calidad para bancos de sangre*, y derivado de la gran importancia para mantener la calidad en los resultados de las pruebas inmunohematológicas; adjunto al presente enviamos el panel de muestras del **Programa de Control de Calidad Externo en Inmunohematología**, el cual puede estar compuesto por 1 muestra de suero y 1 muestra de eritrocitos conservados en solución anti-coagulante y preservadora, obtenidas en el CNTS a través de procedimientos estandarizados

[cceinmuno.cnts@gmail.com](mailto:cceinmuno.cnts@gmail.com)

**CONSERVACIÓN:**

Después de la recepción del panel, retirar de la caja de cartón y de la hielera (caja de unicel) el contenedor con las muestras del **CONTROL DE CALIDAD DE INMUNOHEMATOLOGÍA** y conservar en refrigeración (2 a 8 °C) hasta su procesamiento.

**NO CONGELAR****ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS**

Realice el análisis de cada muestra para las pruebas inmunohematología de acuerdo a los **PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS**, es decir, proceda con las muestras del panel como si fuesen muestras de donantes.

**Una hemolisis de hasta 2+, en las células es NORMAL.**

**INFORME DE RESULTADOS**

Una vez concluidas las pruebas, complete el "Formato de reporte de resultados" del Programa, con los datos y resultados obtenidos. No olvide conservar sus resultados como evidencia de su participación en este programa de acuerdo a la normativa correspondiente.

**EL FORMATO DE REPORTE**

Tener especial cuidado en la transcripción de los resultados.

El reporte de resultados debidamente llenado **debe ser enviado dentro de los 20 días hábiles siguientes.**

**NO ENVIAR VIA FAX.**

ES INDISPENSABLE EL ENVIO DE RESULTADOS **VIA INTERNET.**

[cceinmuno.cnts@gmail.com](mailto:cceinmuno.cnts@gmail.com)

**ANOTE EN FORMATOS :**

**REGISTRO DE RESULTADOS Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.**

- 1- EL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN.
- 2- ESTADO.
- 3- **CLAVE ÚNICA DE PARTICIPACIÓN (CUP).**
- 4- NOMBRE DEL RESPONSABLE SANITARIO.
- 5- CORREO ELECTRÓNICO.

**ENVIO DE RESULTADOS.**

1.- ESCANEAR LOS (2) FORMATOS.

2.- GUARDAR EL ARCHIVO EN LA PC.

3.- ABRIR SU CORREO ELECTRÓNICO Y ENVIAR **VIA INTERNET A**

[cceinmuno.cnts@gmail.com](mailto:cceinmuno.cnts@gmail.com)

Duda o comentario  
**01(55) 51194620 ext. 1305**  
**Dra. Gloria Estrada García**  
**Dirección Técnica y de Investigación.**

